

692

Rampe pieghevoli

Trasportare uno scooter o una carrozzina sulla propria auto, diventa facile grazie alle rampe. Queste rampe pieghevoli permettono di posizionare in sicurezza scooter o carrozzine pesanti sulla propria auto.










**Borsa di trasporto inclusa.
Un kit contiene due rampe.**



Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mobilità illimitata

Dati tecnici 692

						
1800	920	370	290	50	9 kg per pezzo	150 kg per pezzo

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).

01 Le maniglie facilitano il trasporto delle rampe

02 Superficie antiscivolo per una migliore trazione della carrozzina o scooter

Portata massima **03**
150 kg per rampa

Utilizzo delle rampe

Queste rampe sono di facile utilizzo:

1. Aprire la rampa.
2. Posizionare la copertura antiscivolo sulla superficie che deve essere superata.
3. Assicurarsi che le rampe abbiano una posizione stabile.
4. Spingere lo scooter o la carrozzina sulle rampe (senza che nessuno sia seduto sopra).

04 Fornito con rivestimento antiscivolo per una migliore aderenza delle rampe



VERMEIREN Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it

Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.



VERMEIREN
Mobilità illimitata



Modifiche tecniche riservate.